


Indikator Iradiasi Sterin™ - Gunakan Instruksi


1. Jangan paparkan ke suhu $<-50^{\circ}\text{C}$ atau $>50^{\circ}\text{C}$ - Hindari paparan suhu tinggi yang berlebihan. Periksa indikator suhu kanan bawah sebelum menggunakan. Jangan gunakan jika indikator suhu merah/jingga.
2. Tarik strip tembus pandang untuk mengeluarkan satu indikator Sterin™ dari kotak dispenser. Tindakan ini akan memaparkan perekat di sisi depan indikator.
3. Periksa Sterin™ untuk mengonfirmasi bahwa pesan visual "NOT IRRADIATED" (TIDAK TERADIASI) ditampilkan. Jangan gunakan indikator jika kata "NOT" (TIDAK) tidak terlihat.
4. Sambil menahan indikator di bagian tepinya, tempelkan indikator ke bagian dalam wadah "tembus pandang" sehingga sisi cetak indikator menghadap keluar.
5. Meradiasi wadah dengan indikator ditempelkan pada dosis yang diperlukan untuk produk. Dosis paparan harus sama dengan atau lebih besar dari dosis minimum yang dicetak pada indikator Sterin™ (misalnya 70 Gy, 100 Gy, 125 Gy, 145 Gy).
6. Setelah pemaparan, periksa film peka radiasi di tengah indikator untuk memastikan sepenuhnya buram, menutupi kata "NOT" (TIDAK) sehingga indikator menampilkan pesan visual "IRRADIATED" (TERADIASI). Contoh Indikator Sterin™ sebelum dan sesudah iradiasi diilustrasikan di bawah ini.

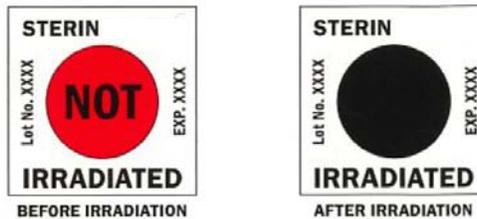

Contoh Sterin™ sebelum dan sesudah iradiasi

Ringkasan Kinerja: STERIN™ memberikan verifikasi visual permanen dari iradiasi pada atau di atas dosis minimum yang diindikasikan.

Untuk terjemahan, pindai kode QR atau kunjungi www.ashland.com/sterin

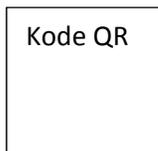

Suhu



Indikator